

Montering av Active airBody Dryer

Gratulere med din nye kroppsføner! Denne skal alltid monteres av en autorisert elektriker etter norsk standard. Vedlagt finner du en dansk monteringsanvisning. Vi ber deg lese gjennom punktene under før montering.

1. Kroppsføner krever 16 ampers sikring.
2. Kroppsføner er en fast installasjon. Den skal ikke monteres med stikkontakt.
3. Kroppsføner monteres utenfor sone 1. Dersom det ønskes en annen løsning skal elektriker gå god for den alternative løsningen etter norsk standard.
4. Husk alltid å feste nederste del av kroppsføner mot gulv med litt silikon, slik at beinet holdes stabil.
5. Se vedlagt monteringsanvisning.
6. Kroppsføner skal monteres utenfor sone 1. Se bilde:



Har du spørsmål vedrørende montering av kroppsføner? Ta kontakt med oss på mob.nr. 91579376/95079618 eller post@hjelpemiddelpartner.no