


HJELPEMIDDEL™ PARTNER

ERGOBAUM

HURTIGVEILEDNING




- Les igjennom veiledningen for å sikre riktig bruk av produktet
- Sørg for at alle deler er korrekt satt sammen og låst/strammet
- Bruk krykkene med forsiktighet på veldig glatt underlag eller ved store hindringer
- Pass på at krykkene er riktig innstilt for deg (se under)
- Det er viktig at vinkeljusteringen på håndtak er låst skikkelig

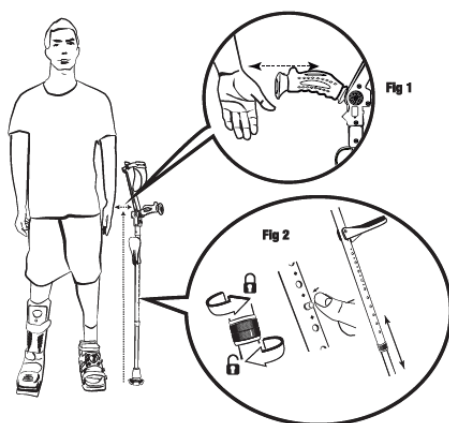


- Juster krykkene slik at de passer i henhold til figuren ved siden av.
- Høyden på krykken justeres ved å trykke inn krykkelåsen (fig.2)
- Etterstram klemringen nederst for å forhindre ulyd og for å sikre at krykken sitter godt sammen.
- Juster håndtaket ved å løsne rattet på baksiden (fig.1) – den kan stilles i 3 posisjoner – skru så rattet godt til etterpå


Sette inn batterier

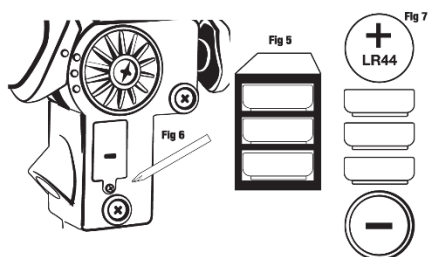

- Skru opp skruen til beskyttelseslokket på siden av krykken med en liten stjernetrekker
- Ta ut medfølgende batterier LR44 og sett de inn i riktig rekkefølge
- Skru fast beskyttelseslokket igjen og lyset er klart til bruk.
 - Av/på bryter for lys er på baksiden av krykken.

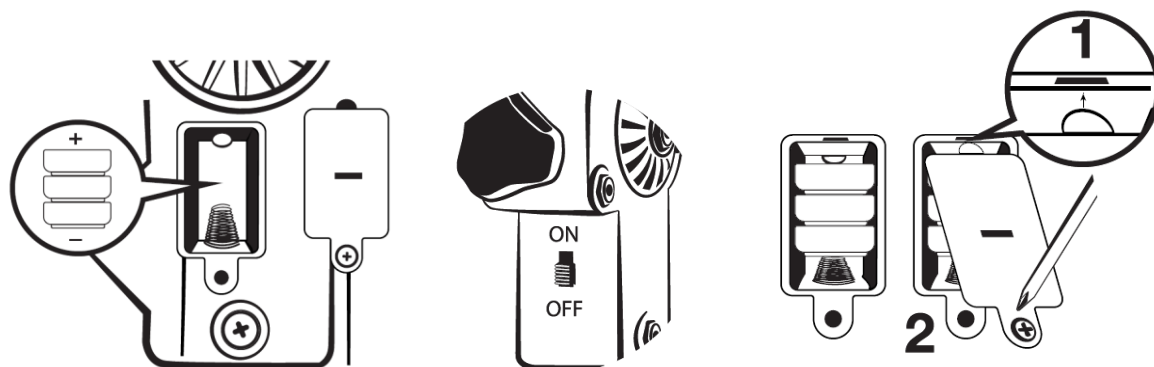

Skifte doppsko

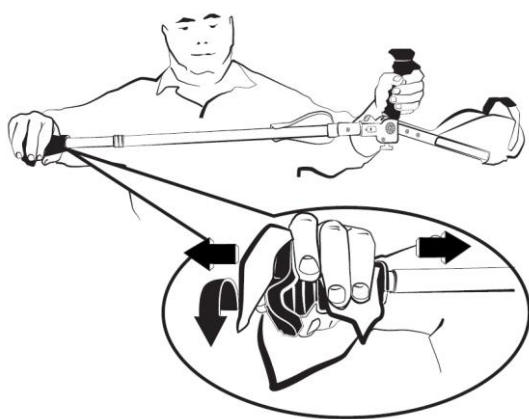

- Hold hardt i krykken mens du vrir og drar i doppskoen. Bruk gjerne et fuktig håndkle for å få større friksjon.
- For å sette på nye doppsko gjør du motsatt, vri og skyv doppskoen på plass mens du holder godt i krykken (se figur ved siden av)
- Husk vinterdoppsko hvis krykkene skal brukes ute vinterstid!

